



Утверждаю

А.Ю. Байкова

07 апреля 2020г.

Алгоритм

дезинфекции маски тканевой многократного применения в ГАУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №9 г. Уфа

1. После использования маски тканевой многократного применения в течение 2 часов необходимо провести дезинфекцию в месте первичного сбора (непосредственно в лечебном кабинете) в контейнере для дезинфекции медицинских отходов класса «Б» (режим белье нательное, одежда персонала) с применением дезинфицирующего средства Триосепт Люкс 1%, время экспозиции 30 минут.
2. По истечении времени экспозиции необходимо тщательно промыть маску под проточной водой в течение 3 минут, затем высушить в специально отведенном месте на сушилке.
3. Начальник МТО упаковывает и отправляет в стирку, согласно договора.
4. После стирки маску необходимо простерилизовать паровым методом в паровом стерилизаторе при температуре 134 градуса в течение 5 минут в пакете для стерилизации.